

Português

Instrução de Uso: IFU-00024 - 0004

MS/ANVISA nº: 10396830015

Nome Técnico ANVISA: Elásticos Ortodônticos

Nome Comercial da Família ANVISA: ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS

Importante: Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em www.morelli.com.br/IFU. Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail sac@morelli.com.br. Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto.



Fabricado por:


Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiá, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil

Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985

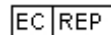

Representante Europeu


Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

Elástico Corrente

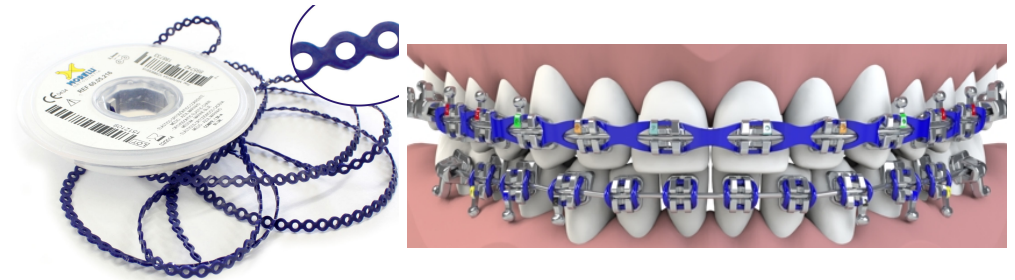

Os elásticos em Corrente são elastômeros ortodônticos, empregados como promotores de forças extras que possibilitam a redução dos espaços interdentais com maior rapidez.

Possuem três formas de apresentação, curto, médio ou longo para melhor adequação à intenção de aplicação.

Elástico Corrente CURTO



Elástico Corrente MÉDIO



Elástico Corrente LONGO

**Indicação de uso:**

- Retrações dentárias anteriores;
- Trações dentárias;
- Giros dentários;
- Fechamentos de espaços interdentais generalizados (Diastemas);
- Fechamentos de espaços relacionados a dentes extraídos/perdidos.

Contraindicações:

A Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com deficiência na higiene bucal.

- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento.
- Pacientes com ambiente bucal propício a desmineralização do esmalte dentário.
- Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodôntico.
- Doenças ou outras condições pré-existentes que possam dificultar o tratamento ortodôntico.
- Reabsorção radicular.
- Reabsorção óssea existente.
- Descalcificação existente no esmalte dentário.
- Uso em ambiente de Ressonância Magnética.

Efeitos colaterais:

É da inteira responsabilidade do profissional qualificado identificar qualquer risco e/ou contraindicação que possa surgir durante o tratamento, e comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral indesejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais indesejados podem incluir:

- Danos na mucosa oral e língua;
- Dificuldade ao falar ou mastigar;
- Descoloração de dentes;
- Descalcificação;
- Reabsorção radicular;
- Complicações periodontais;
- Reações alérgicas;
- Dificuldades na manutenção da higiene oral;
- Dor;
- Desconforto;
- Sensibilidade.

Validade:

36 meses.

Advertências:

Conservar em lugar fresco e arejado. Evitar a exposição à temperatura elevada ou à luz intensa, de modo a evitar a diminuição da vida útil do produto e perda das propriedades mecânicas.

Ligaduras elastoméricas estão sujeitas a alteração de cor no ambiente bucal: Considere substituí-las em períodos menores para manter o efeito estético desejado.

O produto segue os padrões dimensionais, força inicial (F0) e residual após 24h (F24), conforme estabelecidos nas normas ABNT NBR ISO 21606 e DIN EN ISO 21606.

Este produto não deve ser utilizado em ambiente de Ressonância Magnética, pois pode ocasionar interferências nas imagens durante o exame. Cabe ao profissional de ortodontia advertir o paciente sobre esta contraindicação e providenciar a remoção do aparelho caso necessário.



Produto não reutilizável, pois o seu reuso pode causar infecção cruzada e perda de propriedades mecânicas devido ao desgaste natural.

O produto é fornecido na condição não esterilizado, contudo possui biocompatibilidade comprovada não sendo necessárias medidas de limpeza, desinfecção ou esterilização, desde que a embalagem não tenha sido violada. Caso o produto, antes do uso, entre em contato com superfícies ou substâncias diferentes do propósito de uso, recomenda-se descartar o mesmo. O produto não deve ser reutilizado ou reprocessado.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Cabe ao profissional qualificado orientar seus pacientes do risco de aspiração e deglutição na hipótese de quebra/desprendimento das peças, não deve subestimar as possíveis complicações imediatas ou tardias decorrentes desse tipo de acidente e precisa informar adequadamente o paciente e/ou seus responsáveis legais sobre os riscos inerentes ao acontecimento e quais as condutas a serem tomadas.

Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por pessoas sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário, fenestração, recessão gengival ou deiscência de raiz.

Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gingivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

Diâmetro Interno (Di); Diâmetro Externo (Do); Comprimento do elo (K); Espessura de corte na secção transversal (t); Força inicial (F₀); Força residual após 24 horas (F₂₄).

Corrente Curto

(Di - $\varnothing 1,4^{+0,2}mm$); (Do - $\varnothing 3,0^{+0,2}mm$); (K - $2,5^{+0,2}mm$); (t - $0,7^{+0,1}mm$); (F₀ - 310gf $\pm 50gf/3N \pm 0,5N$); (F₂₄ - >55%)

Corrente Médio

(Di - $\varnothing 1,4^{+0,2}mm$); (Do - $\varnothing 3,0^{+0,2}mm$); (K - $3,3^{+0,2}mm$); (t - $0,7^{+0,1}mm$); (F₀ - 310gf $\pm 50gf/3N \pm 0,5N$); (F₂₄ - >55%)

Corrente Longo

(Di - $\varnothing 1,4^{+0,2}mm$); (Do - $\varnothing 3,0^{+0,2}mm$); (K - $4,0^{+0,2}mm$); (t - $0,7^{+0,1}mm$); (F₀ - 245gf $\pm 50gf/2,4N \pm 0,5N$); (F₂₄ - >55%)


Códigos:

¹ Organismo Certificador

Código	Tipo	Cor	Qtde	Comp. elo	CE	Org ¹
60.05.104	CURTO	AZUL BEBÊ	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.105	CURTO	AMARELO	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.107	CURTO	VERDE MUSGO	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.108	CURTO	AZUL	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.110	CURTO	VERMELHO	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.111	CURTO	PRETO	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.112	CURTO	ROSA	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.113	CURTO	ROXO	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.115	CURTO	VERDE MAR	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.116	CURTO	AZUL MARINHO	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.117	CURTO	PRATEADO	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.119	CURTO	ROSA BEBÊ	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.120	CURTO	MARFIM	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.122	CURTO	VINHO	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.124	CURTO	VERDE PÉROLA	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.126	CURTO	ROSA PÉROLA	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.127	CURTO	BRANCO RENDA	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.128	CURTO	LILÁS	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.150	CURTO	VERDE LIMÃO CRISTAL	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.151	CURTO	VERMELHO CRISTAL	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.152	CURTO	LARANJA CRISTAL	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.153	CURTO	VERDE CRISTAL	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.154	CURTO	AZUL CRISTAL	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.155	CURTO	PINK CRISTAL	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.159	CURTO	UVA CRISTAL	COMPR. 1,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.204	MÉDIO	AZUL BEBÊ	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.205	MÉDIO	AMARELO	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.207	MÉDIO	VERDE MUSGO	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.208	MÉDIO	AZUL	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.210	MÉDIO	VERMELHO	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-

Código	Tipo	Cor	Qtde	Comp. elo	CE	Org ¹
60.05.211	MÉDIO	PRETO	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.212	MÉDIO	ROSA	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.213	MÉDIO	ROXO	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.215	MÉDIO	VERDE MAR	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.216	MÉDIO	AZUL MARINHO	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.217	MÉDIO	PRATEADO	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.219	MÉDIO	ROSA BEBÊ	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.220	MÉDIO	MARFIM	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.222	MÉDIO	VINHO	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.224	MÉDIO	VERDE PÉROLA	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.226	MÉDIO	ROSA PÉROLA	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.227	MÉDIO	BRANCO RENDA	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.228	MÉDIO	LILÁS	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.250	MÉDIO	VERDE LIMÃO CRISTAL	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.251	MÉDIO	VERMELHO CRISTAL	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.252	MÉDIO	LARANJA CRISTAL	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.253	MÉDIO	VERDE CRISTAL	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.254	MÉDIO	AZUL CRISTAL	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.255	MÉDIO	PINK CRISTAL	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.259	MÉDIO	UVA CRISTAL	COMPR. 1,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.304	LONGO	AZUL BEBÊ	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.305	LONGO	AMARELO	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.307	LONGO	VERDE MUSGO	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.308	LONGO	AZUL	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.310	LONGO	VERMELHO	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.311	LONGO	PRETO	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.312	LONGO	ROSA	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.313	LONGO	ROXO	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.315	LONGO	VERDE MAR	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.316	LONGO	AZUL MARINHO	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-

Código	Tipo	Cor	Qtde	Comp. elo	CE	Org ¹
60.05.317	LONGO	PRATEADO	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.319	LONGO	ROSA BEBÊ	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.320	LONGO	MARFIM	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.322	LONGO	VINHO	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.324	LONGO	VERDE PÉROLA	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.326	LONGO	ROSA PÉROLA	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.327	LONGO	BRANCO RENDA	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.328	LONGO	LILÁS	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.350	LONGO	VERDE LIMÃO CRISTAL	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.351	LONGO	VERMELHO CRISTAL	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.352	LONGO	LARANJA CRISTAL	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.353	LONGO	VERDE CRISTAL	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.354	LONGO	AZUL CRISTAL	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.355	LONGO	PINK CRISTAL	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.359	LONGO	UVA CRISTAL	COMPR. 1,50 m	4mm	C E	-
60.05.500	CURTO	CRISTAL	COMPR. 4,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.501	CURTO	CINZA	COMPR. 4,50 m	2,5mm	C E	-
60.05.510	MÉDIO	CRISTAL	COMPR. 4,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.511	MÉDIO	CINZA	COMPR. 4,50 m	3,3mm	C E	-
60.05.520	LONGO	CRISTAL	COMPR. 4,50 m	4mm	C E	-
60.05.521	LONGO	CINZA	COMPR. 4,50 m	4mm	C E	-

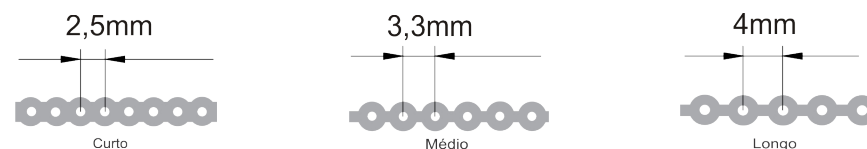

Revisão	Data	Alterações
0	05/2018	Elaboração e disponibilização no portal Morelli.
1	10/2019	Revisão das contraindicações, efeitos colaterais e advertências.
2	01/2021	Revisão da máscara e composição.
3	08/2021	Atualização da máscara, advertências e ajuste de idiomas.
4	07/2022	Correção dos valores de tolerância nas medidas dos elásticos.