

## Português

**Instrução de Uso:** IFU-00049 - 0007

**MS/ANVISA nº:** 10396830045, 10396839003

**Nome Técnico ANVISA:** Componentes para Ortodontia

**Nome Comercial da Família ANVISA:** COMPONENTES AUXILIARES PARA ORTODONTIA,  
MÁSCARA FACIAL DE PETIT

**Importante:** Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em [www.morelli.com.br/IFU](http://www.morelli.com.br/IFU). Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail [sac@morelli.com.br](mailto:sac@morelli.com.br). Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto.

**Fabricado por:**


Dental Morelli Ltda.

📍 Alameda Jundiáí, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil

☎ Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985

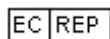

Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras – Portugal – 2780125

☎ Tel.: 351 21 4439292

## Máscara Facial Petit




A Máscara Facial Petit, é um dispositivo destinado à correção da má oclusão de Classe III, quando o objetivo principal é a tração reversa da maxila. Este, é um procedimento mecânico, ortodôntico e ortopédico, cuja principal função é a correção do problema dentário / esquelético.

**Indicação de uso:**

Descrição das situações clínicas de aplicação mais comuns:

- Deslocamento anterior da maxila e dentes superiores;
- Rotação horária da mandíbula;
- Inclinação lingual dos incisivos inferiores;
- Aumento do terço inferior (região do nariz ao mento);
- Deslocamento da espinha nasal anterior;
- Inibição do crescimento mandibular.

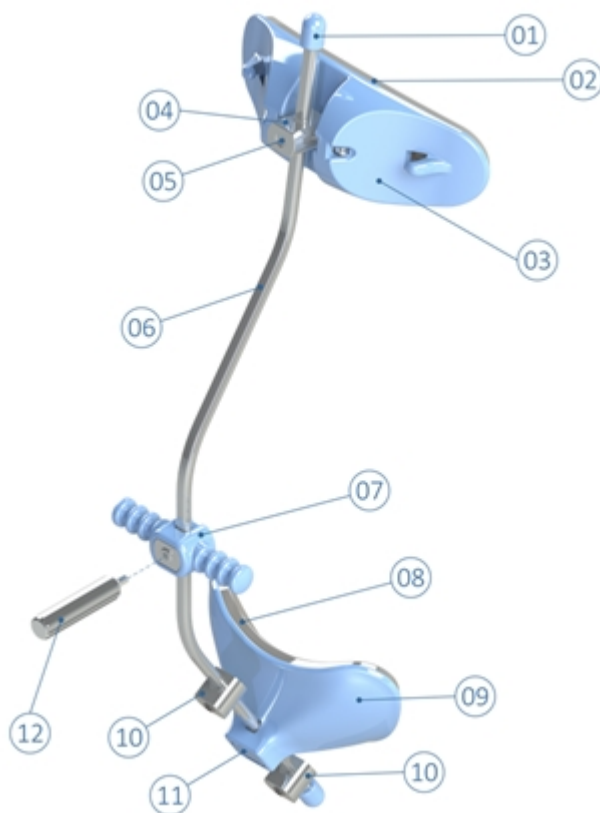

- 1- Ponteira de proteção.
- 2- Espuma para proteção.
- 3- Apoio Glabellar
- 4- Corpo metálico articulado.
- 5- Parafuso de ajuste.
- 6- Haste central.
- 7- Suporte regulável para tracionamento através de elásticos.
- 8- Espuma para proteção.
- 9- Mentoneira regulável.
- 10- Corpo metálico fixador.
- 11- Tampa plástica para mentoneira.
- 12- Chave digital para regulagem dos componentes (acompanha o produto).

### Recomendações para ajustes da Máscara Facial Petit

O apoio de testa, o suporte para tracionamento e a mentoneira, podem ter suas posições modificadas, bastando apenas a utilização da “**chave digital**”, que acompanha o produto. Após posicionados, deve-se reapertar os parafusos, até que os mesmos permaneçam devidamente fixados à haste central.

### Manuseio:

A Máscara Facial Petit é passível de ser configurada de dois modos:

#### Mentoneira Articulada

Insira o corpo metálico fixador na haste central.

Insira a tampa plástica no alojamento da Mentoneira.

Insira os componentes montados mentoneira + tampa plástica na haste metálica.

Adicione o segundo corpo metálico fixador na haste central.

Realize os ajustes pertinentes ao paciente e fixe os dois corpos metálicos, através de seus parafusos.



#### Mentoneira Fixa

Caso seja necessário, remova a tampa da mentoneira, rotacionando o conjunto para baixo sobre uma mesa.

Insira o corpo metálico no alojamento da mentoneira.

Insira os componentes montados mentoneira + corpo metálico, na haste central.

Realize os ajustes pertinentes ao paciente e fixe o corpo metálico, através de seu parafuso.



## Imagem ilustrativa da instalação da Máscara Facial Petit



Após realizado os devidos ajustes, as pontas em excesso deverão ser removidas e as ponteiros de proteção recolocadas, a fim de evitar possíveis lesões. Para cortar a haste, utilize disco abrasivo.

## Ganchos para fixação da cinta de posicionamento



Nos casos em que se fizer necessário estabilizar o apoio de testa, há em suas laterais dois ganchos os quais permitem a fixação da cinta (ref. 70.20.011 – Elástico Parietal com Fivela Dupla), no entanto a mesma não acompanha o produto.

## Recomendações ao paciente:

- **Atenção:** Este produto pode ocasionar dermatite de contato em pessoas com hipersensibilidade. Nestes casos, recomenda-se cessar o uso e consultar seu ortodontista.
- **Proteção da pele:** Havendo desconforto no contato com a pele, recomenda-se forrar as superfícies de contato com gaze ou disco de algodão.
- **Limpeza:** Recomenda-se higienizar com esponja macia, água e sabão neutro. Após, enxugar e secar em local ventilado, ao abrigo do sol.

## Contraindicações:

A Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com deficiência na higiene bucal;
- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento;
- Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodôntico;
- Doenças ou outras condições pré-existentes que possam dificultar o tratamento ortodôntico;
- Uso em ambiente de Ressonância Magnética.

## Efeitos colaterais:

É da inteira responsabilidade do ortodontista identificar qualquer possibilidade de risco de dano e/ou contraindicação que possa surgir durante o tratamento, comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral não desejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais não desejados podem incluir:

- Danos na mucosa oral e língua;
- Dificuldade ao falar ou mastigar;
- Descoloração de dentes;
- Descalcificação;
- Reabsorção radicular;
- Complicações periodontais;
- Reações alérgicas;
- Dificuldades na manutenção da higiene oral;

- Dor;
- Desconforto;
- Sensibilidade.

**Validade:**

60 meses.

**Advertências:**

Não é recomendado o uso do produto durante a realização de atividades físicas.

Este produto pode ocasionar dermatite de contato quando usado por pessoas com hipersensibilidade.

Para promover o aperto e soltura dos parafusos, utilizar somente a chave digital que acompanha ao produto.

Durante os ajustes do componente suporte regulável para tracionamento, orientar o paciente a permanecer com a cavidade oral fechada.

O produto não deve ser esterilizado em autoclave, uma vez que este processo pode ocasionar prejuízo aos componentes;

Por requerer a colaboração do paciente para o sucesso do tratamento, o uso em pacientes hiperativos pode requerer um tempo de tratamento maior.

O fabricante recomenda uso único.

Este produto não deve ser utilizado em ambiente de Ressonância Magnética, pois pode ocasionar interferências nas imagens durante o exame. Cabe ao profissional de ortodontia advertir o paciente sobre esta contraindicação e providenciar a remoção do aparelho caso necessário.



Uso em único paciente, múltiplas vezes.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Cabe ao profissional qualificado orientar seus pacientes do risco de aspiração e deglutição na hipótese de quebra/desprendimento das peças, não deve subestimar as possíveis complicações imediatas ou tardias decorrentes desse tipo de acidente e precisa informar adequadamente o paciente e/ou seus responsáveis legais sobre os riscos inerentes ao acontecimento e quais as condutas a serem tomadas.

Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por pessoas sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário, fenestração, recessão gengival ou deiscência de raiz.

Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

**ATENÇÃO:**

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

**Elástico Parietal**

Utilizados para prover, através da tração baixa, melhor estabilidade ao componente apoio glabellar, presente nas máscaras faciais de Petit.

**Contraindicações:**

A Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com deficiência na higiene bucal;
- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento;
- Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodôntico;
- Doenças ou outras condições pré-existentes que possam dificultar o tratamento ortodôntico;
- Uso em ambiente de Ressonância Magnética.

**Efeitos colaterais:**

É da inteira responsabilidade do ortodontista identificar qualquer possibilidade de risco de dano e/ou contraindicação que possa surgir durante o tratamento, comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral não desejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais não desejados podem incluir:

- Danos na mucosa oral e língua;
- Dificuldade ao falar ou mastigar;
- Descoloração de dentes;
- Descalcificação;
- Reabsorção radicular;
- Complicações periodontais;
- Reações alérgicas;
- Dificuldades na manutenção da higiene oral;
- Dor;
- Desconforto;
- Sensibilidade.

**Validade:**

36 meses.

**Advertências:**

Este produto pode ocasionar dermatite de contato quando usado por pessoas com hipersensibilidade.

O produto não deve ser esterilizado em autoclave, uma vez que este processo pode ocasionar prejuízo aos componentes;

Por requerer a colaboração do paciente para o sucesso do tratamento, o uso em pacientes hiperativos pode requerer um tempo de tratamento maior.

Não é recomendado o uso do produto, durante a realização de atividades físicas.

Este produto não deve ser utilizado em ambiente de Ressonância Magnética, pois pode ocasionar interferências nas imagens durante o exame. Cabe ao profissional de ortodontia advertir o paciente sobre esta contraindicação e providenciar a remoção do aparelho caso necessário.

O fabricante recomenda uso único.



Uso em único paciente, múltiplas vezes.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Cabe ao profissional qualificado orientar seus pacientes do risco de aspiração e deglutição na hipótese de quebra/desprendimento das peças, não deve subestimar as possíveis complicações imediatas ou tardias decorrentes desse tipo de acidente e precisa informar adequadamente o paciente e/ou seus responsáveis legais sobre os riscos inerentes ao acontecimento e quais as condutas a serem tomadas.

Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por pessoas sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário, fenestração, recessão gengival ou deiscência de raiz.

Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

**ATENÇÃO:**

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

**Códigos:**

<sup>1</sup> Organismo Certificador

Código	Quantidade	CE	Org <sup>1</sup>
70.20.011	01 UN.	C E	-
70.50.001	01 UN.	C E	-
70.50.002	01 UN.	C E	-

Revisão	Data	Alterações
0	09/2017	Elaboração da Instrução de uso que acompanha o produto.
1	09/2017	Atualização de informações nos idiomas inglês/espanhol na instrução de uso que acompanha o produto.
2	09/2017	Atualização de informações nos idiomas inglês/espanhol na instrução de uso que acompanha o produto.
3	09/2017	Inclusão das frases "www.morelli.com.br" e "MADE IN BRAZIL", na Instrução de Uso que acompanha o produto.
4	09/2017	Alteração da Chave Tipo Allen para Chave digital e substituição dos parafusos.
5	09/2017	Mudança no design da chave digital.
6	02/2020	Adição do Produto Elástico Parietal com Fivela Dupla e informações pertinentes; Revisão das advertências; Adição de Recomendações ao Paciente.
7	09/2021	Atualização da máscara, advertências e ajuste de idiomas.