

## Português

**Instrução de Uso:** IFU-00095 - 0000

**MS/ANVISA nº:** 10396830049

**Nome Técnico ANVISA:** Instrumentos auxiliares na prática odontológica

**Nome Comercial da Família ANVISA:** INSTRUMENTOS PARA ORTODONTIA

**Importante:** Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em [www.morelli.com.br/IFU](http://www.morelli.com.br/IFU). Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail [sac@morelli.com.br](mailto:sac@morelli.com.br). Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto.

**Fabricado por:**


Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiá, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil

Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985

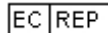

Representante Europeu


Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

## ACALCADOR DE BANDAS

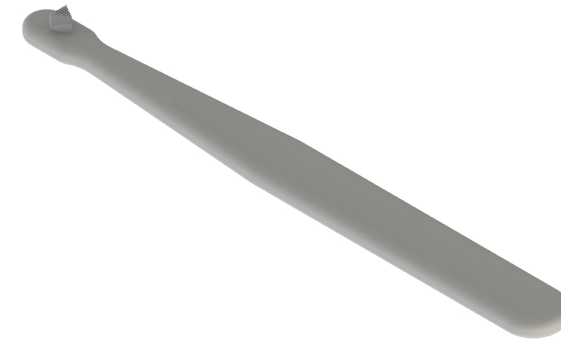

O Acalgador de Banda é utilizado para auxiliar os profissionais qualificados na acomodação da banda ortodôntica no dente, possuindo formatos triangular, triangular invertido, redonda e quadrada. Devido suas características construtivas, o produto possui a resistência necessária para pressionar a banda contra o dente do paciente.


**Indicação de uso:**

Descrição das situações clínicas de aplicação mais comuns:

- Acomodar as bandas ortodônticas no dente.

**Manuseio:**

Coloque a ponta metálica do Acalgador na parede da banda ortodôntica e pressione, sentido vertical e horizontal, para adaptar a banda ao dente.

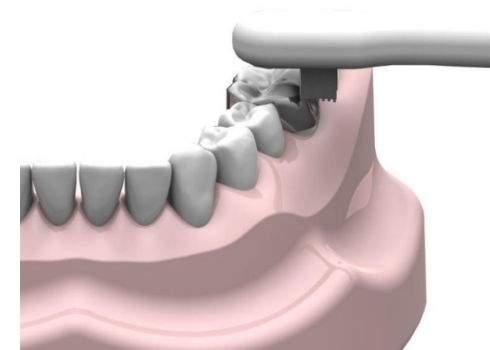

**Contraindicações:**

A Morelli fornece este (s) produto (s) apenas a profissionais qualificados, dos quais é de inteira responsabilidade identificar condições que tornem este (s) produto (s) contraindicado (s) ao tratamento. Desde que utilizado corretamente, para a finalidade indicada, e respeitadas as instruções de uso, não são identificadas contraindicações referentes ao uso deste (s) produto (s).

**Efeitos colaterais:**

A Morelli fornece este(s) produto(s) apenas a profissionais qualificados, dos quais é de inteira responsabilidade identificar e comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito(s) colateral(ais) indesejado(s). Desde que utilizado corretamente, para a finalidade indicada, e respeitadas as instruções de uso e contraindicações, não são identificados efeitos colaterais referentes ao uso deste(s) produto(s).

**Validade:**

60 meses.

**Limpeza e esterilização:**

Para uma limpeza e esterilização segura e eficaz, utilizar as "**INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO**", em [www.morelli.com.br/IFU](http://www.morelli.com.br/IFU). Para facilitar a busca no site, o documento encontra-se junto ao código do produto.

**Advertências:**

Produto não esterilizável em estufa seca.

Após esterilizado, manter o produto em sua embalagem de esterilização, armazenado em um lugar seco e livre de sujidades.

Abrir somente no momento de uso.

O fim da vida útil do instrumento é também determinado pelo desgaste e danos causados pelo uso.

Os produtos devem ser utilizados apenas por profissionais qualificados e devem ser usados apenas para a finalidade a que se destinam.

Todos os produtos são enviados na condição não estéril e devem ser limpos e esterilizados antes do primeiro uso, bem como antes de cada uso subsequente.

Verifique as condições de uso do instrumento antes de cada procedimento, respeitando sua vida útil e garantindo assim seu perfeito funcionamento. Seu processamento foi validado em até 15 utilizações, após este período recomenda-se sua substituição.



Produto esterilizado por vapor em autoclave até 121°C / 250°F. Por serem usados no corpo humano podem apresentar riscos associados ao uso, devendo ser garantida sua esterilidade.



Este produto contém Níquel e Cromo. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a estes metais. Caso ocorram reações alérgicas, oriente o paciente a procurar um médico.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluidos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

**ATENÇÃO:**

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

**Códigos:**

<sup>1</sup> Organismo Certificador

Código	Quantidade	CE	Org <sup>1</sup>
75.01.011	01 UN.	C E	-
75.01.012	01 UN.	C E	-
75.01.013	01 UN.	C E	-
75.01.014	01 UN.	C E	-

Revisão	Data	Alterações
0	11/2022	Elaboração e disponibilização no portal Morelli.