

Português

Instrução de Uso: IFU-00105 - 0000

MS/ANVISA nº: 10396830070

Nome Técnico ANVISA: Instrumentos de Uso Odontológico

Nome Comercial da Família ANVISA: CHAVE PARA CONTRA ÂNGULO

Importante: Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em www.morelli.com.br/IFU. Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail sac@morelli.com.br. Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto.



Fabricado por:


Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiá, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil

Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985

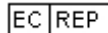

Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

CHAVE PARA CONTRA-ÂNGULO



A chave de Contra-Ângulo é um dispositivo empregado para acionar a caneta odontológica de baixa rotação sem a necessidade do micromotor. Trata-se de um manipulador de corpo único que se acopla ao sistema de acionamento mecânico do contra-ângulo, promovendo o funcionamento do contra-ângulo com a rotação controlada manualmente.

É indicado para facilitar a instalação de Miniparafusos em local de acesso limitado.

Indicação de uso:

O produto é indicado para facilitar a instalação de Miniparafusos Ortodônticos em:

- Palato Duro;
- Crista Infracingomática (IZC);
- Buccal Shelf;
- Tuberosidade Maxilar;
- Sítios posteriores que em que seja necessária a instalação tendo como base o longo eixo dental.

Contraindicações:

A Morelli fornece este (s) produto (s) apenas a profissionais qualificados, dos quais é de inteira responsabilidade identificar condições que tornem este (s) produto (s) contraindicado (s) ao tratamento. Desde que utilizado corretamente, para a finalidade indicada, e respeitadas as instruções de uso, não são identificadas contraindicações referentes ao uso deste (s) produto (s).

Efeitos colaterais:

A Morelli fornece este(s) produto(s) apenas a profissionais qualificados, dos quais é de inteira responsabilidade identificar e comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito(s) colateral(ais) indesejado(s).

Desde que utilizado corretamente, para a finalidade indicada, e respeitadas as instruções de uso e contra-indicações, não são identificados efeitos colaterais referentes ao uso deste(s) produto(s).

Limpeza e esterilização:

Para uma limpeza e esterilização segura e eficaz, utilizar as "**INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO**", em www.morelli.com.br/IFU. Para facilitar a busca no site, o documento encontra-se junto ao código do produto.

Validade:

120 meses.

Advertências:

Produto não esterilizável em estufa seca.

Após esterilizado, manter o produto em sua embalagem de esterilização, armazenado em um lugar seco e livre de sujidades.

Abrir somente no momento de uso.

O fim da vida útil do instrumento é também determinado pelo desgaste e danos causados pelo uso.

Os produtos devem ser utilizados apenas por profissionais qualificados e devem ser usados apenas para a finalidade a que se destinam.

Todos os produtos são enviados na condição não estéril e devem ser limpos e esterilizados antes do primeiro uso, bem como antes de cada uso subsequente.

Verifique as condições de uso do instrumento antes de cada procedimento, respeitando sua vida útil e garantindo assim seu perfeito funcionamento. Seu processamento foi validado em até 100 utilizações, após este período recomenda-se sua substituição.



Produto esterilizado por vapor em autoclave até 121°C / 250°F. Por serem usados no corpo humano podem apresentar riscos associados ao uso, devendo ser garantida sua esterilidade.



Este produto contém Níquel e Cromo. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a estes metais. Caso ocorram reações alérgicas, oriente o paciente a procurar um médico.

Uso em múltiplos pacientes e múltiplas vezes.

Para uso exclusivo de profissional qualificado.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

Códigos:

¹ Organismo Certificador

Código	Quantidade	CE	Org ¹
37.20.016	01 UN.	-	-

Revisão	Alterações
0	Elaboração e disponibilização no portal Morelli.