

## Português

**Instrução de Uso:** IFU-00106 - 0001

**MS/ANVISA nº:** 10396830066

**Nome Técnico ANVISA:** Dispositivo oral para redução da capacidade de mordida

**Nome Comercial da Família ANVISA:** ORTHO PROTECTOR

**Importante:** Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em [www.morelli.com.br/IFU](http://www.morelli.com.br/IFU). Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail [sac@morelli.com.br](mailto:sac@morelli.com.br). Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto.

**Fabricado por:**


Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiáí, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil

Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985

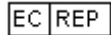

Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

## ORTHO PROTECTOR



O Ortho Protector é uma placa de levante de mordida que age como um relaxante muscular. Ideal para quem apresentam estresse oclusal, tal como bruxismo e disfunções temporomandibular. Pode ser utilizado em conjunto com o tratamento ortodôntico.


Modelo de tamanho único e ajustável aos diferentes tamanhos de arcada. Possui 4 níveis de ajuste para maior conforto durante o uso. Acompanha uma caixa de bolso para transporte e armazenamento.

**Indicação de uso:**

Descrição das situações de aplicação mais comuns:

- Relaxante muscular para pessoas com musculaturas tensas ou fadigas;
- Disfunção Temporomandibular Sintomática como alívio imediato das dores orofaciais;
- Bruxismo;
- Facetas Laminadas (lente de contato);
- Ortodontia como liberador oclusal em caso de mordidas cruzadas
- Reabilitação protética e implantes para proteção noturna.


**Recomendações de Uso**

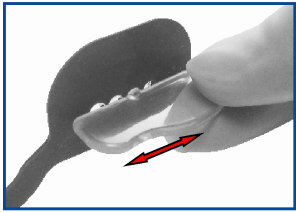

- Ajuste a posição das placas oclusais, deixando a região maior sobre os últimos molares.



- Há quatro posições disponíveis, para melhor ajuste e conforto.
- Molhar o conjunto facilita a movimentação e o ajuste de posição.

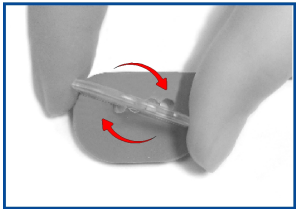

- Ajuste também a rotação das placas oclusais, para que a alça frontal se acomode na cervical dos incisivos inferiores, porém evitando que toque no freio labial.



- Caso haja bráquetes, procure evitar a interferência da alça com os mesmos.
- O aparelho funciona com a boca fechada e é mantido em posição pela pressão dos lábios, bochechas e mordida.
- Evitar morder as placas oclusais com força, procurando somente “descansar” os dentes sobre elas.

- Após o uso, higienizar com escova dental e pasta, enxaguar, secar e guardar na caixa de bolso.

### Contraindicações:

Este produto apresenta algumas contraindicações que devem ser observadas antes do uso para garantir uma experiência segura e adequada.

- Alergia a qualquer um dos materiais do produto.
- Pessoas com transtornos mentais que requerem cuidados especiais ou crianças com idade inferior a 9 anos.

### Efeitos colaterais:

Desde que utilizado corretamente, para a finalidade indicada, e respeitadas as instruções de uso e contraindicações, não são identificados efeitos colaterais referentes ao uso deste(s) produto(s).

### Validade:

36 meses.

### Advertências:



Uso em único paciente, múltiplas vezes.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Considerando que o produto é constituído de materiais sujeitos a reciclagem, seu descarte deve ser feito de forma correta e seletiva.

### ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

### Códigos:

<sup>1</sup> Organismo Certificador

Código	Produto	Quantidade	CE	Org <sup>1</sup>
65.03.001	Ortho Protector Azul	01	-	-
65.03.002	Ortho Protector Rosa	01	-	-

Revisão	Alterações
0	Elaboração e disponibilização no Portal Morelli.
1	Revisão da contraindicação e advertências do produto.