

plic

pinça ortodôntica



Cód. 75.01.028

Simples e prática, a **pinça PLIC** auxilia em diversas aplicações no consultório.

Através da ponta rebaixada, oferece vantagens comprovadas na aplicação de elásticos, molas, arcos e acessórios.

POR QUE ESCOLHER A PINÇA PLIC MORELLI?

- Eficiência na aplicação
- Evita a deformação dos elásticos intraorais provocada pelos aplicadores de ligadura
- Facilita o posicionamento dos acessórios no aparelho ortodôntico




Ponta com rebaixo para encaixe, apreensão e aplicação de acessórios ortodônticos.



114mm

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO

A **pinça PLIC** pode ser utilizada para:

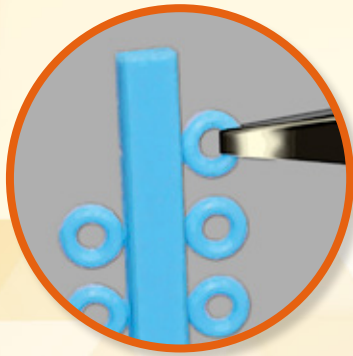

Retirar o elástico modular do Stick com segurança.



Instalar elásticos nos bráquetes com pouca deformação.




Aplicar elásticos em "X".



Encaixar os arcos ortodônticos nos slots.



Aplicar elásticos corrente.

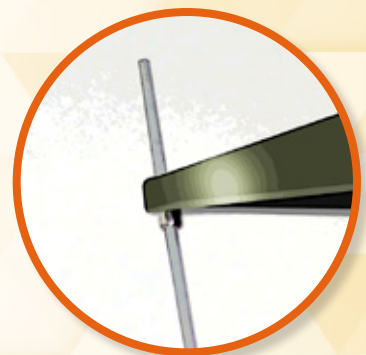

Posicionar stops redondos no arco.



Instalar molas em ganchos e miniparafusos.



Aplicar molas nos arcos intraorais.